



FICHE TECHNIQUE – NOTICE D'UTILISATION

Masque adulte à usage non sanitaire catégorie 2 – lavable et réutilisable – Origine France
AFNOR : SPEC S76-001 – Label OEKOTEX : CQ1139/1 IFTH

Performances : Masque dont les performances ont été mesurées par les laboratoires de DGA (Direction Générale de l'Armement) catégorie 2 (UNS2) = masque individuel à visée collective pour protéger l'ensemble d'un groupe portant ces masques. Réutilisable et lavable 60 fois.

Efficacité de protection aux aérosols : particules 3 µm :78% /Usage protection du protecteur flux mesuré de l'extérieur vers l'intérieur, à l'inspiration
Perméabilité à l'air (en L.m-2 ,S-1) à dépression 100 Pa :248/ Usage rétention des projections flux mesuré de l'intérieur vers l'extérieur à l'expiration

1^{er} utilisation :

- Nouer l'élastique et laver impérativement le masque à 60°C pendant 30 minutes minimum. Un premier lavage est indispensable pour permettre au masque de prendre sa forme.
Ne pas mettre seul en machine, utiliser un filet ou taie d'oreiller.
- Sécher à l'air libre dans les deux heures suivants le lavage
- Repasser à la vapeur coton-lin, 120°C
- Nouer l'élastique à votre taille
- Le port du masque est limité à 4 heures.

Recommandations de manipulation des masques :

- Avant de mettre le masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique.
- Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veiller à l'ajuster au mieux sur le visage.
(Le tissu blanc à l'extérieur, le tissu couleur à l'intérieur contre votre visage, l'étiquette vers le menton)
- Eviter de toucher le masque une fois porté, se laver les mains chaque fois que l'on touche un masque usagé.
- Lorsqu'il est humide, le remplacer par un nouveau, ne pas réutiliser de masque usagé.
- Pour retirer le masque, l'enlever par derrière, ne jamais toucher le devant du masque, l'isoler immédiatement dans un sac prévu pour cet usage ; se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique.

Entretien du masque :

Après utilisation, le masque doit être isolé pour être lavé. Il peut être isolé dans un sac plastique à jeter après usage ou dans un sac réutilisable à laver.

Méthode de lavage :

Laver en machine à 60°C, cycle de 30 minutes minimum. Ne pas faire bouillir le masque. Sécher à l'air libre dans les deux heures suivants le lavage.

Composition :

Tissu = 57% coton 33% lin 10% tencel

Élastique = 100% polyester-élasthane ou polyamide-élasthane

Stockage :

Conserver les masques dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.

Ce masque barrière n'est ni un dispositif médical au sens du règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équivalent de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (comme masque filtrant de type FFP2). Design établi, testé et entièrement réalisé dans nos ateliers en Alsace.



15, rue Paul Lang - F - 68560 HIRSINGUE

Tél. : +33 (0) 3 89 07 52 07

Site internet: www.emanuel-lang.fr

Email : masques@emanuel-lang.fr

